



## Nail Panel

### SPECIMEN COLLECTION PROCEDURES

#### SPECIMEN TYPE

- Nail clippings submitted in a small clean bag provided by Precision Health Solutions.
- Call the laboratory for other acceptable transport containers.

#### COLLECTION PROCEDURE

1. Debride and discard distal nail clippings.
2. Obtain ~3 mm specimen from the most proximal area of nail and hyponychium.
3. Use curette to obtain additional subungual debris as this will increase potential yield.
4. Place dry nail sample and subungual debris into clean bag.
5. Immediately label the sample collection container with first name, last name and date of birth.
  - If submitting multiple samples, please label specimen bag with sample source.
  - *If this step is missed, your sample may be subject to rejection.*
6. Contact PHS to schedule courier pick-up.





Precision Health Solutions

## Panel de Uñas

### PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS

#### TIPO DE MUESTRA

- Recortes de uñas enviados en una pequeña bolsa limpia proporcionada por Precision Health Solutions.
- Llame al laboratorio para otros contenedores de transporte aceptables.

#### PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE MUESTRA

1. Remueva y deseche los recortes de uñas distales.
2. Obtenga una muestra de ~3 mm del área más proxima de la uña y el hiponiquio.
3. Utilice una pala para obtener restos subungueales adicionales, ya que esto aumentará el rendimiento potencial.
4. Coloque la muestra de uña seca y los residuos subungueales en una bolsa limpia.
5. Inmediatamente etiquete el recipiente de recolección de muestras con nombre, apellido y fecha de nacimiento.
  - Si envía varias muestras, etiquete la bolsa de muestra con la fuente de la muestra.
  - Si se omite este paso, su muestra puede estar sujeta a rechazo.
6. Comuníquese con PHS para programar la recogida por mensajería.



info@precision-healthsolutions.com



727-235-0886



833-288-9397

